

Foire Aux Questions

Comment Mepiform rend-il les cicatrices moins visibles ?

Après de nombreuses années d'utilisation des pansements de silicone différents ont démontré que la silicone rend les cicatrices moins visibles.

Quel genre de cicatrices peut-on traiter ?

Mepiform convient aux cicatrices nouvelles et anciennes rouges, décolorées et/ou soulevées. On peut traiter les cicatrices hypertrophiées et chéloïdes. Les seins, les épaules et les lobes d'oreille sont des régions très sensibles et propices à la formation excessive de cicatrices.

Est-ce que le traitement est douloureux ?

Pas du tout. Comme la silicone souple adhère en douceur à la peau, l'application ou le retrait se fait entièrement sans douleur.

Combien de temps le traitement dure-t-il ?

Cela dépend de la gravité, de la taille et de la forme de la cicatrice. On obtient les meilleurs résultats avec les cicatrices rouges. Pour le traitement prophylactique, on doit utiliser Mepiform pendant 3 à 6 mois selon l'état de la cicatrice. On doit répéter le traitement si la cicatrice provoque la démangeaison, devient rouge ou dépasse la peau avoisinante. Une cicatrice chéloïde doit être traitée pendant au moins un an.

La cicatrice disparaîtra-t-elle ?

On utilise Mepiform pour traiter les cicatrices dans les hôpitaux partout dans le monde. Mepiform améliore considérablement l'apparence des cicatrices. Même si la cicatrice demeure, elle est moins rouge, pique moins et les tissus sont moins relevés.


Est-ce Mepiform permet l'exposition au soleil ?

On doit protéger une nouvelle cicatrice contre le soleil pour éviter la décoloration. Mepiform procure une protection contre les rayons UV de 7,7, mais il faut préciser que cela n'est pas suffisant pour garantir une protection totale.

Fait-il prendre des précautions ?

On doit utiliser Mepiform sur les plaies fermées et guéries seulement. La peau doit être sèche quand vous mettez le pansement en place. En cas de démangeaison ou d'inconfort, enlever Mepiform et bien lire le feuillet qui accompagne le produit.


Instructions d'utilisation de Mepiform

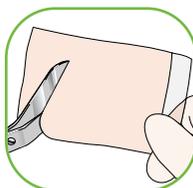

Retirer le film. Au besoin, couper à la forme voulue.



Appliquer Mepiform sur la cicatrice.

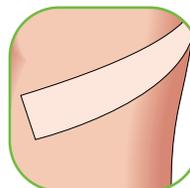

Appliquer une autre couche après le nettoyage quotidien de la cicatrice.

Bienfaits de Mepiform

- Aucune fixation supplémentaire requise
- Mepiform est mince, souple et discret
- Peut être porté pendant toutes les activités quotidiennes
- Peut être appliqué plus d'une fois
- On peut utiliser un produit Mepiform pendant sept jours ou plus

Note

En cas de macération ou d'éruption cutanée, laisser la peau reposer jusqu'à ce que le symptôme soit disparu. Poursuivre le traitement et accroître graduellement la durée quotidienne du traitement. Mepiform offre un facteur de protection contre les rayons ultraviolets équivalent à 7,7.



Mepiform est emballé de manière stérile et par pièce

No article	Format cm	Unités/boîte	Unités/caisse
293100	4 x 30	5	25
293200	5 x 7,5	5	30
293400	10 x 18	5	25

Mölnlycke Health Care
1-800-494-5134
www.molnlycke.ca

Le nom et le logo Mölnlycke Health Care, Safetac® et Mepiform® sont des marques déposées de Mölnlycke Health Care AB.
Gamlestadvägen 3C, Göteborg, Suède 40252



CA0180907FR

Mepiform®

Le choix préféré en traitement des cicatrices



Mepiform®



Film extérieur non tissé

- Mince et discret
- Épouse les formes du corps
- Laminé non tissé en viscosse et polyuréthane non absorbant
- Perméable à la vapeur d'eau
- Étanche

Couche de silicone souple (Safetac®)

- Adhère en douceur à la peau fragile
- Diminue le traumatisme et la douleur au retrait
- Aucune fixation supplémentaire requise

Cicatrices

Les cicatrices se composent essentiellement d'une protéine appelée collagène qui est le tissu le plus courant de l'organisme. Certaines blessures laissent des cicatrices plates qui disparaissent avec le temps ; d'autres cicatrices sont soulevées et décolorées.

Cicatrices hypertrophiées et chéloïdes

Les cicatrices hypertrophiées et chéloïdes sont des formations anormales qui apparaissent sur la peau qui guérit après un traumatisme, une inflammation, un vaccin, une chirurgie ou des brûlures. Elles se caractérisent par une quantité excessive de tissu cicatriciel, de bosses dures et rouges, comme de la corde, qui peuvent provoquer une démangeaison. La différence entre les cicatrices hypertrophiées et les cicatrices chéloïdes réside dans la capacité des cicatrices chéloïdes de dépasser la zone de la blessure.

Traitement des cicatrices

De nombreuses techniques de traitement des cicatrices hypertrophiées et chéloïdes ont été démontrées :

- Chirurgie
- Injections de corticostéroïde
- Application de gel de silicone
- Pressothérapie

On utilise largement le gel de silicone pour traiter les cicatrices hypertrophiées et chéloïdes. Son efficacité est évidente et les résultats d'essais ont démontré que le gel de silicone représente un moyen sûr et efficace de traiter les cicatrices hypertrophiées et chéloïdes.

Exemples de cicatrices sur lesquelles Mepiform® peut être appliqué



Plaies chirurgicales fermées

Chéloïdes

Cicatrice hypertrophiée

Mepiform - le choix préféré en pansements à gel de silicone

Mepiform est un pansement discret, mince et confortable à couche de silicone souple. Selon les recommandations internationales¹, les pansements à gel de silicone doivent être le choix préféré pour traiter les cicatrices hypertrophiées et les cicatrices chéloïdes mineures.

Lisser, adoucir et décolorer

Mepiform à couche de silicone souple, Safetac, lisse, adoucit et décolore les cicatrices rouges et distinctives attribuables à la chirurgie, aux accidents, comme les coupures et les brûlures, et aux cicatrices hypertrophiées et chéloïdes, et les rend moins visibles. On peut aussi utiliser Mepiform comme traitement prophylactique afin d'éviter la formation excessive de cicatrices pendant la période de formation des cicatrices qui dure environ un an.

Comment utiliser Mepiform

Afin de prévenir les cicatrices chez les personnes susceptibles de développer des cicatrices de façon excessive, le traitement aux pansements de gel de silicone doit débuter dès que possible après la guérison de la plaie. Pour obtenir des résultats optimaux, on doit utiliser Mepiform pendant 24 heures ; le traitement peut durer de 3 mois à un an selon l'état de la cicatrice et peut varier d'une personne à l'autre. Mepiform est un pansement auto-adhésif qui épouse toutes les formes et ne requiert aucune fixation supplémentaire. Il peut rester en place pendant le bain ou la douche, mais on doit le retirer régulièrement pour inspecter et nettoyer la peau. Le même Mepiform peut être utilisé pendant un maximum de deux semaines.

Résultats du traitement avec Mepiform



Avant le traitement ²

Après 6 mois de traitement ²



Avant le traitement ³

Après 2 ans de traitement ³

1. International Clinical Recommendations on Scar Management, Mustoe T.A, et al. Plast. Reconstr. Surg 2002; Vol 110, No. 2. 560-571.

2. An Evaluation of Mepiform® with Safetac® Technology for the Management of Hypertrophic Scars, Carla. M, et al. Louisiana State University Medical Center 2003.

3. Treatment of Severe Keloid Formation in Childhood by Using Occlusive Dressing, Wagner. G, Akt Dermatol 2002; 28:359-362.

Pansement de silicone souple auto-adhésif pour traiter les cicatrices