

Mepiform®

Itsekiinnittyvä pehmeä silikonisidos arpien hoitoon

- Erillistä kiinnitystä ei tarvita
- Mukautuu hyvin kehton muotoihin
- Voidaan pitää päivittäisten toimien aikana



Kalvo/kuitukangastausta

- Lämpäisee höyryä
- Vedenkestävä

Safetac®-kerros

- Ei aiheuta variota iholle poistettaessa

Miten Mepiform toimii


Ulkoisesti käytettävän silikonin on kokemusperäisesti osoitettu vaikuttavan hypertrofisten ja keloidisten arpien hoitamiseen.¹ Arpikudoksen kunnosta riippuen vanhan arven paraneminen saattaa kestää 3 kuukaudesta vuoteen tai kauemmin. Mepiformia suositellaan käytettäväksi 24 tuntia vuorokaudessa ja se on hyvä poistaa kerran päivässä esimerkiksi suihkun, saunan tai hikiliikunnan ajaksi ihon tarkistusta tai pesemistä varten. Ehkäisevässä hoidossa Mepiformia käytetään 2-6 kuukautta arven kunnosta riippuen.

Käyttöalueet


Mepiform on suunniteltu:

- Vanhojen ja uusien hypertrofisten ja keloidiariapien hoitoon sekä niiden ennaltaehkäisyyn


Miten Mepiformia käytetään

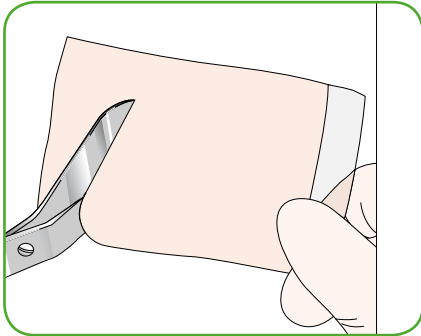

Poista suojakalvo. Leikkaa oikean muotoiseksi tarvittaessa.

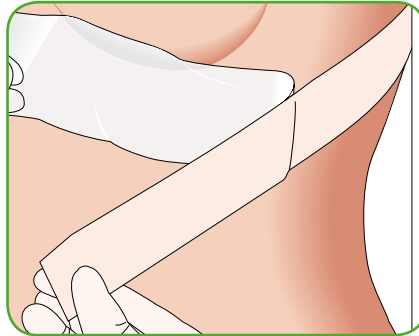

Aseta Mepiform arvelle.

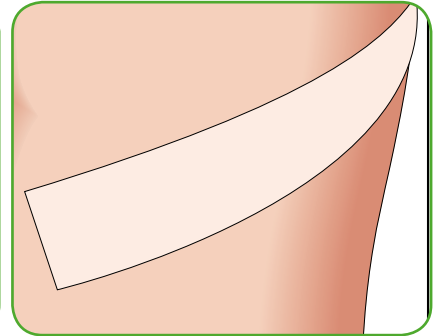

Aseta sidos päivittäisen arven puhdistamisen jälkeen uudelleen paikoilleen.

Mepiformin hyödyt

- Erillistä kiinnitystä ei tarvita
- Mepiform on ohut, joustava ja huomaamaton²
- Voidaan käyttää päivittäisten toimien aikana
- Voidaan käyttää uudelleen
- Yhtä Mepiformia voidaan käyttää seitsemän päivää tai kauemmin

Huomaa

Mikäli iholla ilmenee maseraatiota tai ihottumaa, anna alueen levätä kunnes oireet ovat hävinneet. Jatka hoitoa tämän jälkeen lisäten hoitoaikaa vähitellen päivittäin. Mepiformissa on UV-suoja 7.7.²

Safetac® Teknologia

Safetac on patentoitu pehmeän silikonin kiinnittymis-tekniologia. Safetac takaa hellävaraisen ja varman kiinnittymisen. Safetac vähentää haavalle ja sitä ympäröivälle iholle aiheutuvaa vauriota ja kipua sidosta poistettaessa.

Referenssit:

1. Quinn KJ (1987), Burns 13:33-40; Ahn ST et al (1991), Arch Surg 126:499-504; Dockery GL et al (1994), J Foot Ankle Surg 33:110-19; Katz BE (1995) Cutis 56:65-7; Carney SA et al (1994) Burns 20:163-7.
2. AS/NZS 4399:1996.



Valikoima

Tuotenumero	Koko cm	Kpl/osastopakkaus	Kpl/kuljetuspakkaus
293100	4 x 30	5	50
293200	5 x 7,5	5	25
293400	10 x 18	5	35

Steriilisti yksittäispakattu

Mölnlycke Health Care
Pitäjänmäentie 14, 3 krs
00380 Helsinki
Puh. 0201 622 300, fax. 0201 622 310
www.molnlycke.com

Mölnlycken symboli ja tekstikuvake ovat Mölnlycke Health Caren rekisteröityjä tavaramerkkejä.


Mölnlycke®