

Mepore® Film Roll

Andningsbart, transparent, självhäftande filmförband

Angivna mått på skyddspappret för enkel mätning och klippning

Plasthylsa för enkel användning och förvaring

Hudvänlig vidhäftning för säker fixering och komfort

Andningsbar transparent film bibehåller fukt samtidigt som det minskar risken för maceration

Virus- och bakterietät film som är duschbar



* mikrober större än 25 nm

Mepore Film Roll är ett osterilt filmförband som är idealt för fixering av förband, slangar och kanyler. Mepore Film Roll kan även användas för att skydda ömtålig hud mot vätska och eliminerar risken för kontamination av bakterier och virus.

Mepore® Film Roll


Mölnlycke®

Så här används Mepore® Film Roll



Avlägsna skyddspappret som är markerat med "1".



Applicera Mepore Film Roll när du fortfarande har en bit av skyddspappret kvar. Kontrollera att filmen sitter tätt och smidigt genom att stryka den på huden.



Avlägsna den skyddande filmen som är markerad med "2" genom att dra bort den.



Avlägsna det återstående vita skyddspappret.

Så här fungerar Mepore Film Roll

Mepore Film Roll ger flexibelt skydd för ömtålig hud, det är transparent och formar sig väl efter kroppens konturer. Förbandet fungerar även som en barriär mot vätska och skyddar mot kontamination av bakterier och virus. Mepore Film Roll möjliggör en enkel och säker fixering av förband, slangar och kanyler. Mepore Film Roll bibehåller en fuktig miljö samtidigt som den höga andningsbarheten tillåter avdunstning av överflödigt fukt från såret och den omkringliggande huden.

Fördelar med Mepore Film Roll

- Transparent film med hög andningsbarhet som tillåter avdunstning av överflödigt fukt från såret och minskar risken för maceration
- Hudvänlig vidhäftning för säker fixering och komfort
- Transparent film gör det enkelt att inspektera och upptäcka eventuella komplikationer
- Virus- och bakterietät film, eliminerar risken för kontamination
- Duschbar
- Tunn och smidig film som formar sig väl efter kroppens konturer. Optimerar användningen och ökar patientkomforten
- Angivna mått på skyddspappret för enkel mätning och klippning
- Levereras på en praktisk plasthylsa för enkel användning och förvaring

Användningsområden

Mepore Film Roll kan användas för fixering av förband, slangar och kanyler. Mepore Film Roll är även anpassad för att skydda ömtålig hud mot vätska och kontamination av bakterier och virus. Det är det naturliga valet för fixering eller som täckförband.

Observera

Mepore Film Roll bör inte användas av personer som är känsliga för polyakrylat.

Mepore Film Roll levereras osteril på 10-metersrulle på en praktisk och skyddande plasthylsa i dispenserförpackning]

Art.nr.	Bredd cm	Transp fp
276105	5	24
276110	10	12
276115	15	8

Mer information på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon 031-722 30 00
The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac and Mepore Film Roll are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.


Mölnlycke®