

Melgisorb® Plus

Högabsorberande alginatförband



Hydrofila alginatfibrer

- Mjukt sterilt förband som är tillverkat av kalcium natriumalginat fibrer
- Högabsorberande förband till kraftigt vätskande sår
- Hög fiberstyrka tillåter avlägsning i ett stycke
- Hög retention som minimerar risker för maceration




Melgisorb Plus är ett högabsorberande förband för måttligt till kraftigt vätskande sår.


Melgisorb® Plus


Mölnlycke®


Så här används Melgisorb® Plus

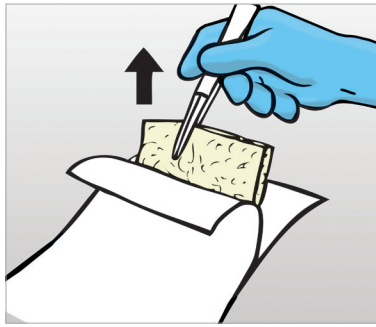

1. Välj en storlek av Melgisorb Plus som är något större än såret. Öppna förpackningen och ta ut förbandet.

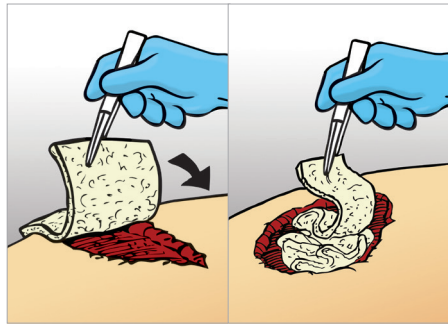

2. Applicera en torr Melisorb Plus på den fuktiga sårbedden.
Ytliga sår: Välj korrekt storlek av en kompress för att täcka hela såret.
Djupa sår och kaviteter: Klipp en passande längd av en tamponad och packa såret löst.

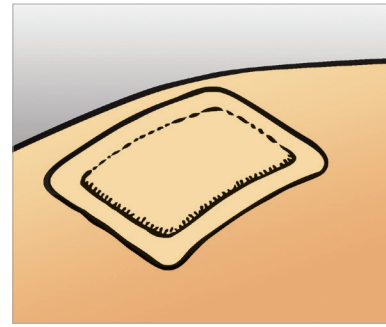

3. Täck och fixera Melgisorb Plus med ett passande ytterförband som till exempel Mepilex® Border.
Kompressionsterapi kan kombineras med Melgisorb Plus.

Så här fungerar Melgisorb Plus

Melgisorb Plus absorberar stora mängder sårsekret. När alginaten kommer i kontakt med sårsekretet bildas en gel som bibehåller fuktig sårmiljö. Gelen kan lätt sköljas bort med vanlig koksattlösning. Melgisorb har en gelblockerande förmåga som förhindrar spridning av vätska i sidled vilket minskar risken för maceration.

Fördelar med Melgisorb Plus

- Högabsorberande
- Bildar en gel (en natriumlösning) vid kontakt med sårvätska
- Fastnar inte på såryta när gel har bildats
- Lämplig för kaviteter
- Minskar risken för maceration
- Bibehåller fuktig sårmiljö
- Mjuk och formbar
- Kan klippas till önskad form
- Framkallar ej allergier

Observera

Melgisorb Plus är inte avsett för torra sår eller tredje gradens brännskador.

Vid kliniska tecken på infektion kan Melgisorb fortsätta användas om lämplig infektionsbehandling inleds.

Användningsområden

Melgisorb Plus kan användas till olika typer av måttligt till kraftigt vätskande sår såsom:

- Trycksår
- Bensår
- Fotsår hos diabetiker
- Tagställen
- Kirurgiska sår
- Traumatiska sår

Melgisorb Plus finns både som kompress och tamponad.

Melgisorb Plus sortiment

Art.nr.	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
252000	5x5	10	100
252200	10x10	10	100
252500	10x20	10	100
Tamponad			
253500	3x45	5	50



Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon 031-722 30 00
Mölnlycke-symbolen och textbilden är registrerade varumärken hos Mölnlycke Health Care AB.


Mölnlycke®