



Käyttöohjeet

Kasvonsuoja korvalenkeillä

- Työnnä sormesi korvalenkkiin läpi. Nenävahvike tulee ylöspäin. Aseta kasvonsuoja nenän ja suun päälle.
- Aseta korvalenkit korvien ympärille. Vedä kasvonsuojaa ylhäältä ja alhaalta avataksesi sen kokonaan. Näin peität kasvot maksimaalisesti ja minimoit kerrokset, joiden läpi hengität.
- Muotoile nenävahvike nenän muotoiseksi.
- Korvat ja hiukset on peitettävä sopivalla päähineellä hiusten ja muiden hiukkasten leviämisen estämiseksi. Jos on olemassa riski altistua kontaminoituneille nesteille, varmista, että valitset 4-kerroksisen roiskekestävän kasvonsuojan visiirillä tai käytät 4-kerroksisen kasvonsuojan lisäksi myös suojalaseja tai visiiriä. Vaihda kasvonsuoja kun se on kontaminoitunut, sekä leikkausten välissä.
- Hävitä kasvonsuoja käytön jälkeen.