

# Udpakning af Biogel® handskepakninger

## 'Holdeteknik'

Der findes forskellige, grundlæggende teknikker til udpakning af sterile operationshandsker. Der er flere grunde til, at udpakningsteknikkerne varierer:

- enkelt- eller dobbeltpaknede handsker
- pakningens udformning og foldning
- de forskellige materialer, der anvendes til både inder- og yderpakning
- den teknik, der bruges ved påtagning af handskerne (åben eller lukket påtagning, med manchetten i hænderne eller fremme)<sup>1</sup>.

Sørg for at yderemballagens kanter ikke kommer i kontakt med inderemballagen, samt at inderemballagen ikke rører den svejste kant på yderemballagens indre kanter. Dette gøres for at sikre inderemballagens/-emballagernes sterilitet.

## Åbning af pakken (udført af en usteril person)



1. Tag fat i pakningens øverste, korte side. Undersøg pakningen, og ryst den om nødvendigt let for at sikre, at inderemballagen ligger midt i pakningen for at undgå, at inderemballagen falder ud på en svejste kant, når yderemballagen åbnes.



2. Træk inderemballagens sider fra hinanden. Start med det øvre hjørne længst væk fra dig selv. Fortsæt med det øvre hjørne tættest på dig.



3. Tag godt fat med begge hænder på hver side af pakningen, så yderemballagens lange sider kan trækkes lidt fra hinanden.



4. Pres begge hænder sammen, så de to inderemballager tvinges fra hinanden.



5. Ved åben påtagning tager man fat i inderhandskens indpakning, handske 1 i Indicator-handskesystemet, i den øverste, korte ende. Sørg for, at den assisterende sygeplejerske vender den rigtige ende af pakningen mod den person, der skal have handskerne på.



6. Når man tager handske 1, skal man sørge for, at hænderne ikke kontaminere handske 2, som stadig ligger i yderemballagen, mens det første par handsker tages på. Imens sikrer den assisterende sygeplejerske, at den inderemballage, der ligger i yderemballagen, holdes steril.



7. Flyt hænderne til inderemballagens nederste, korte ende, og læg inderemballage 1 et tørt og rent sted. Sørg for, at ca. 5 cm af pakningens nederste ende er fri af bordet, så der kan tages fat i den, og inderemballagen kan pakkes op uden risiko for kontaminering af de desinficerede hænder.



8. Åben inderemballage 1 helt, og sørg for, at de desinficerede hænder ikke kontamineres. Tag de farvede inderhandsker på.



9. Tag inderemballage 2 hos den assisterende sygeplejerske, og tag yderhandskerne ud.



10. Tag handskerne på som anbefalet<sup>1</sup>.

Reference: 1 Folin A. Påtagning af indikator dobbelthandske systemer. En Sikker Hånd 1/2010. Mölnlycke Health Care AB.

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
Mölnlycke og Biogel varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0041901