



Påtagningsvejledning: Maske med øreelastik

- A. Tag fingrene gennem øreelastikkerne. Næseklemmen skal være øverst. Placér masken over din næse og mund
- B. Placér elastikkerne omkring ørerne. Træk i masken fra oven og for neden for at folde den helt ud. Dette vil give maskimal dækning af ansigtet og minimere antallet af lag, du skal ånde gennem
- C. Form næseklemmen rundt om næsen for at minimere luftlækage
- D. Ører og hår skal være dækket af en passende hue for at minimere spredningen af hår og andre partikler. Hvis der er risiko for væskestænk, skal du anvende en 4-lags stænkresistent medicinsk ansigtsmaske. Skift maske, når den er kontamineret og mellem hver operation
- E. Smid masken væk efter brug

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
 Mölnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. All rights reserved. DKSU0462004



Mölnlycke®