

Lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien painehaavojen opas – Mepilex® Lite

Mepilex® Lite suojaa ihoa, imee kosteutta ja on osoitettu suojaavan herkkää ihoa ulkoisilta tekijöiltä, kuten lääkinällisien laitteiden käytöstä aiheutuvaa kitkaa ja painetta.^{1,2}


Vastuuvapauslauseke: Sidosten ennaltaehkäisevä käyttö lääkinällisiin laitteisiin liittyvien painehaavojen riskin vähentämisessä on hyvin raportoitu. Niiden käyttöä henkilösuojaimien alla, mahdollisiin vaikutuksiin tiiviyden ylläpitämiseen ja viruksen leviämiseen, ei kuitenkaan ole testattu Mölnlyckellä tai tietojemme mukaan muillakaan tahoilla.

- Mepilex Lite -sidos voidaan helposti leikata sopivan muotoiseksi
- Kun leikkaat Mepilex Lite -sidosta, jätä suojakalvo paikoilleen
- Mepilex Lite kiinnittyy hellävaraisesti Safetac® -teknologian ansiosta³



Safetac
TECHNOLOGY

Kuvissa on esimerkkejä lääkinällisien laitteiden suojaamisalueista




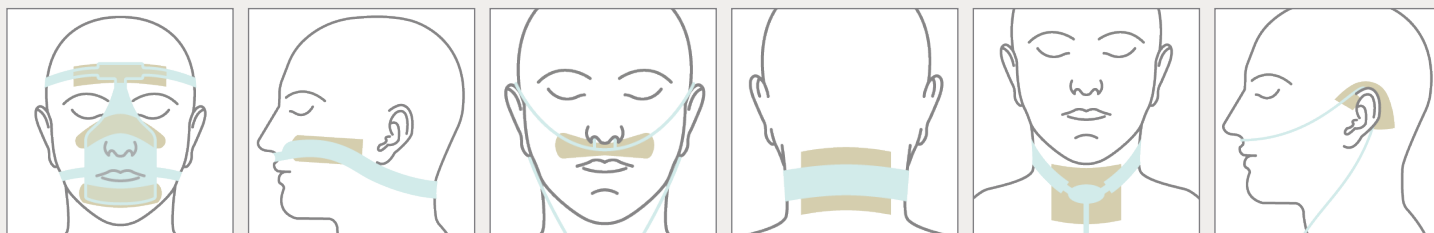


Mepilex® Lite


Mölnlycke®

Ehdotettu leikkausopas

Valitse sidoskoko, joka sopii peittämään kyseisen alueen ja leikkaa mukautumaan potilaan yksilöllisiin tarpeisiin / kehon muotoihin tai laitteen muotoihin. Levitä tarttuva puoli iholle.

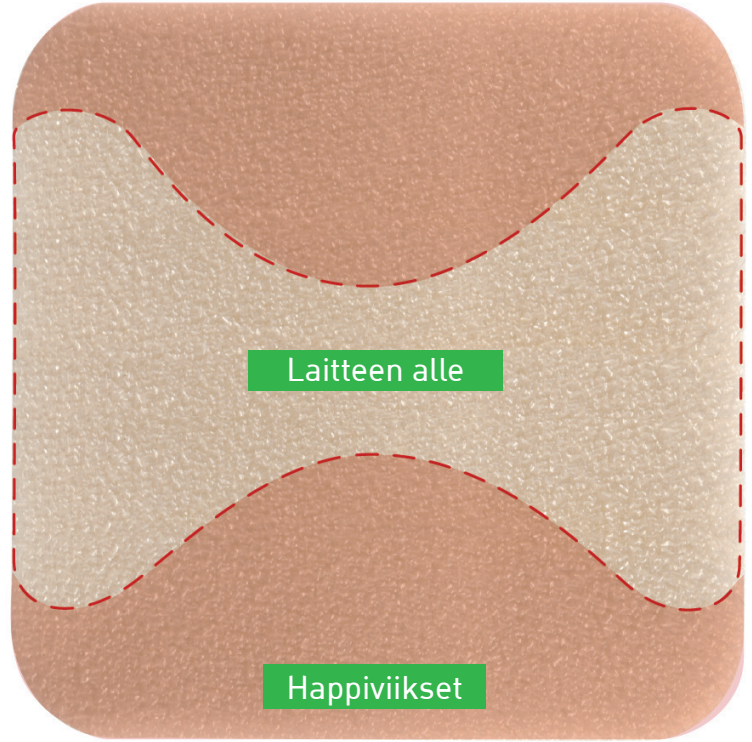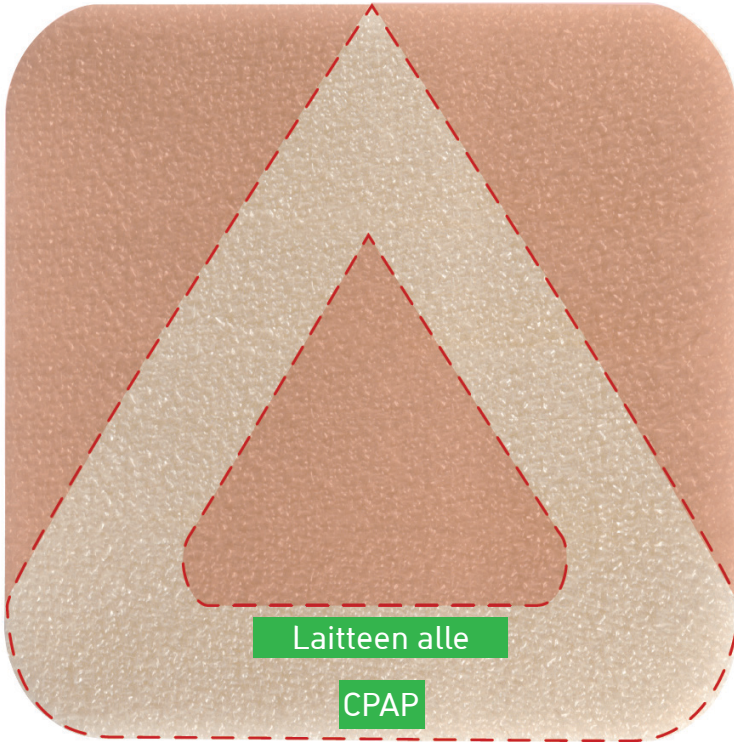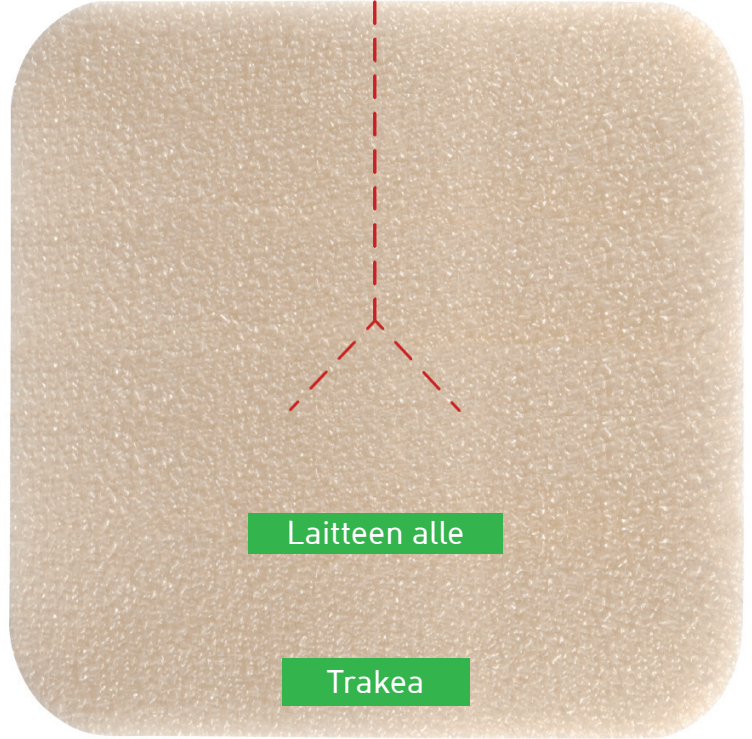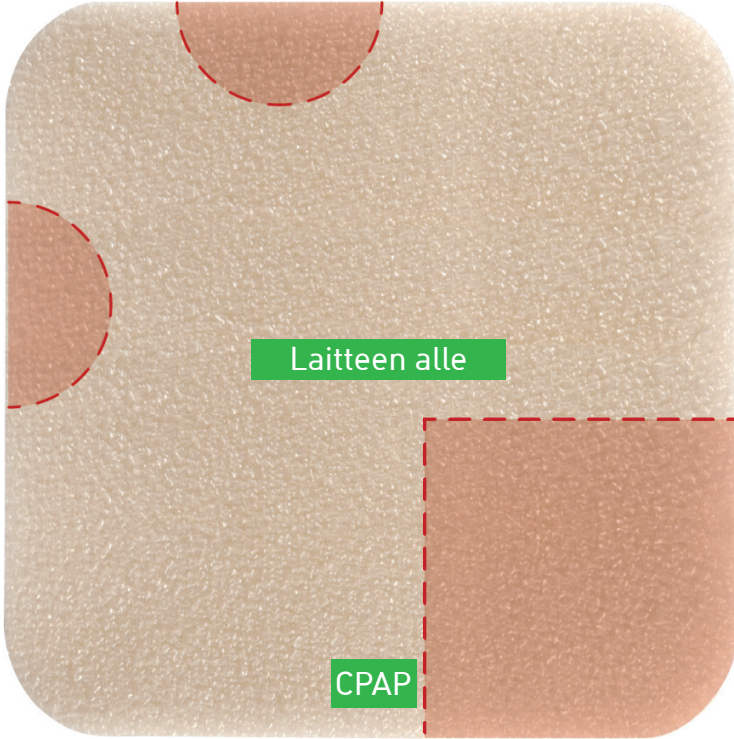

SafetaC
TECHNOLOGY

Vastuuvapauslauseke: Tässä annettuja tietoja ei tule tulkita lääketieteelliseksi hoidoksi tai korvata terveydenhuollon ammattilaisen päätöstä potilaan hoidosta. Nämä tiedot, sisältäen, mutta rajoittamatta, ehdotukset tuotteen käyttäjäksi, tuotteen valintaan ja ehdotettuun käyttöön perustuvat yleistyksiin eivät ota huomioon yksilön haavan ainutlaatuisia ominaisuuksia. Kukin potilaan hoitava terveydenhuollon ammattilainen on yksin vastuussa potilaan haavojen vakavuuden arvioinnista, sopivan hoidon määrittämisestä ja haavan hoidosta.

Viitteet: 1. Boesch RP, Myers C, Garrett T et al. Pediatrics. 2012;129: e792-e797. 2. Cohen LP, Ovdia-Blechman Z, Hoffer O, Gefen A. Int Wound J. 2019; 1-14. 3. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22.

Lue lisää: www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 3. krs, 00380 Helsinki. Puhelin: 0201622300
Mölnlycke-, Mepilex- ja Safetac-tavaramerkit, -nimet ja -logot ovat maailmanlaajuisesti yhden tai useamman Mölnlycke Health Care -yhtiön rekisteröityä omaisuutta. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FIWC0922004


Mölnlycke[®]