

Påkledningsveiledning for Biogel® Indicator® System

LUKKET metode - påkledning med mansjetten over hånden

Ta på den sterile frakken og åpne ytter - og inneremballasjen som anbefalt*



1. Strekk ikke armene gjennom frakkens mansjetter. Mansjettene skal være løse som vist på bildet.



2. Hanskens ytteremballasje åpnes av sirkulerende sykepleier. Ta innerpakken med frakkematerialet slik at hendene forblir inne i frakken.



3. Legg innerpakken i den sterile sonen og sørg for at hanskens fingre peker mot deg. Åpne innerpakken (de fargede hanskene), påse at hendene forblir inne i frakkens erme. Ta den første hansken med din dominerende hånd (høyre hanske med din høyre hånd eller venstre hanske med din venstre hånd.)



4. Vipp hansken forsiktig bakover, slik at den hviler på din venstre eller høyre underarm. Hanskens tommelfinger er nå på linje med din egen tommel.



5. Bruk den andre hånden som fortsatt er inne i frakkens erme og trekk kanten av hansken over din håndrygg.



6. Trekk hansken opp over frakkens mansjett og beveg fingre og tommel på plass så frakken og hansken glir sammen oppover armen.



7. Hansken er nå helt på plass. Påse at hansken alltid dekker frakkens vevede mansjett fullstendig. Ta den andre hansken opp med den hånden som ikke har hanske, på samme måte som ved første hanske.



8. Bruk den påklede hånden til å trekke kanten av hansken over håndryggen på din andre hånd. Beveg fingrene frem og tilbake, til hansken er helt på plass.



9. Ta på ytterhanskene. Påse at ytterhansken er trukket godt over innerhansken (ca 2,5cm) for å unngå at den ruller eller sklir ned. Trykk kantene av hanskens mansjetter godt ned mot frakken for at antiskli-kanten i hansken sitter fast på frakken.



10. Når hanskepåtagningen og evt. justeringen er avsluttet, skal du strekke armene for å sikre deg at hanskene sitter riktig.

Bytting av kontaminert/punkttert hanske under operasjon.



11. Dersom en punksjon oppstår i nærvær av væske blir den synlig ved at det dannes en mørk flekk på punksjonsstedet i ytterhansken.



12. Ta på ytterhansken ved å dra mansjetten over håndflaten slik at hansken har innsiden ut. Kast den kontaminerte/punktterte hansken.



13. Sjekk innerhansken for punksjon. Dersom punkttert, fjern og erstatt hansken etter lokale anbefalinger eller rengjør og tørk sterilt.

Åpne en ny hanskepakke med de korrekte Biogel ytterhanskene for å sikre at Biogel Indicator systemet fungerer på tiltenkt måte. Ta på deg ytterhansken slik at mansjetten på ytterhansken er trukket godt over mansjetten til innerhansken (ca. 2,5 cm) for å unngå at hansken ruller eller sklir ned.

Besøk vår hjemmeside for videoveiledning til påtagning av frakk og operasjonshansker.

Referanse: * Folin A. Utpakning av Indicator-dobbelthanskesystem. En Sikker Hånd 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Norge. Tlf 22 70 63 70. info.no@molnlycke.com
Mölnlycke Health Care og Biogel navn og logo er registrerte varemerker globalt til Mölnlycke Health Care Gruppen.
©2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheter forbeholdt. NOSU0581905


Mölnlycke®