

Klippeguide Mepilex® Lite - utstyrsrelaterte trykkskader

Mepilex® Lite beskytter huden, absorberer fukt og er vist å beskytte skjør hud fra ekstern påvirkning, som friksjon og trykk fra medisinsk utstyr som brukes regelmessig^{1,2}.


Ansvarsfraskrivelse: Forebyggende bruk av bandasjer for å redusere risikoen for medisinske utstyrsrelaterte trykkskader er godt rapportert, men bruk under PPE når det gjelder vedlikehold av en forsegling og potensiell innvirkning på virusoverføring har så vidt vi vet ikke blitt testet av Mölnlycke eller andre.

- Mepilex Lite kan enkelt klippes til ønsket form
- La releasefilmen sitte på når du klipper Mepilex Lite
- Mepilex Lite gir skånsom heft til huden med Safetac® teknologi³



Safetac
TECHNOLOGY

Illustrasjonene viser eksempler på hvordan man kan gi beskyttelse under medisinsk utstyr



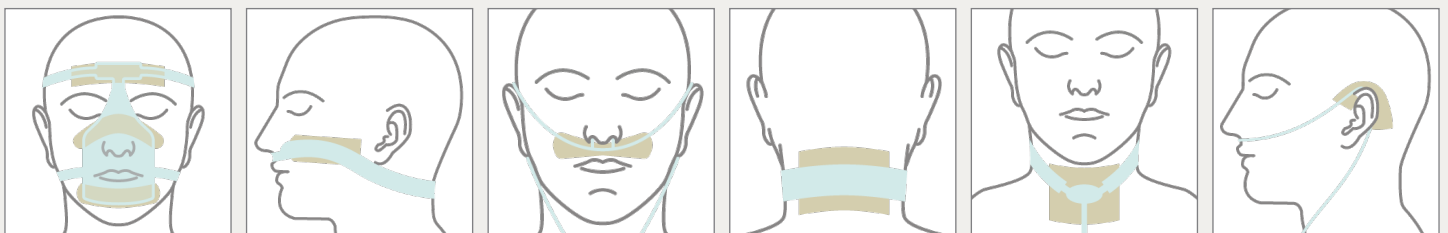


Mepilex® Lite


Mölnlycke®

Foreslått klippeguide

Velg en bandasjestørrelse som er passende for å dekke det berørte området og klipp for å tilpasse rundt spesifikke pasientbehov / kroppskonturer eller utstørsformer. Appliser med den heftende siden mot huden.

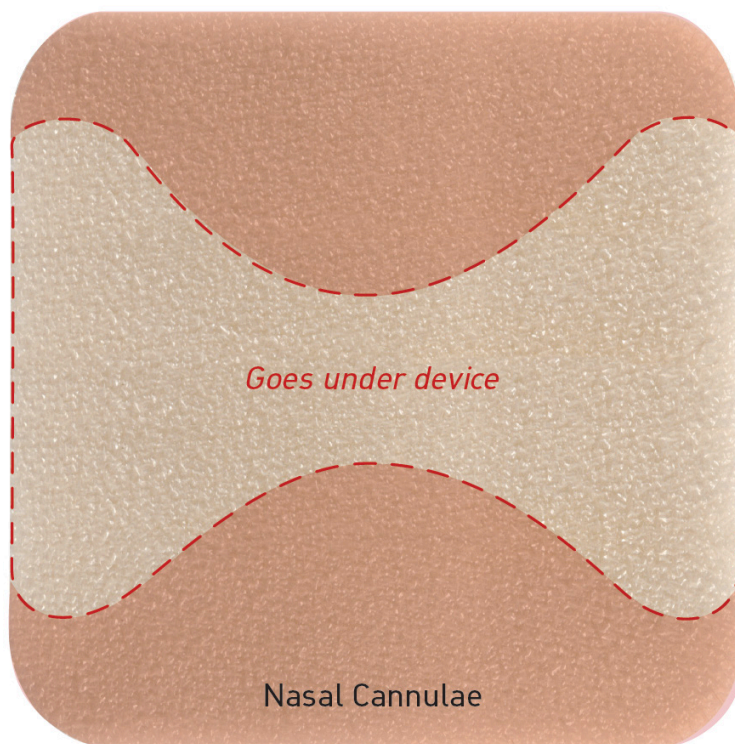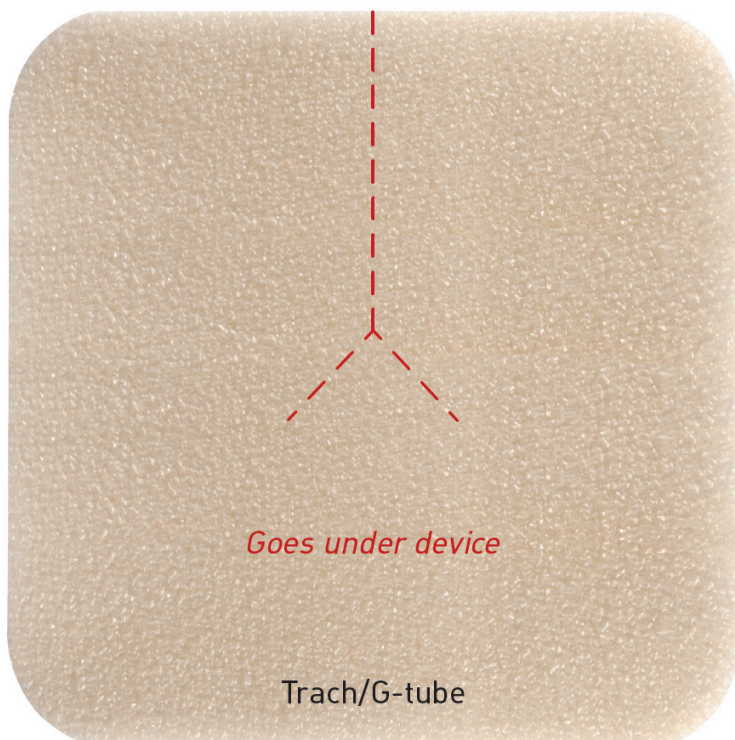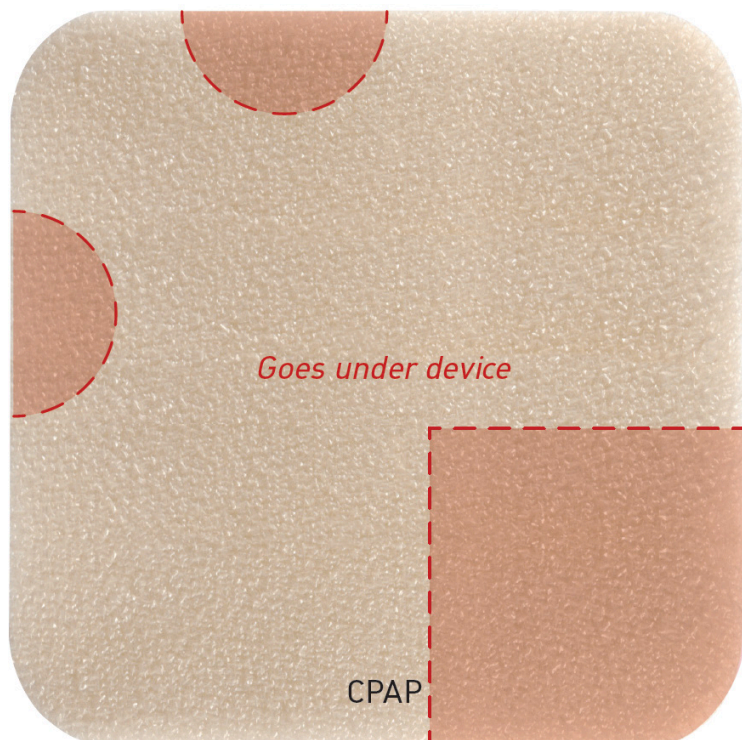

SafetaC
TECHNOLOGY

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen gitt her skal ikke tolkes som medisintøvelse eller erstatte en uavhengig medisinsk vurdering av en pasient gjennomført av en kliniker. Denne informasjonen, inkludert, men ikke begrenset til, forslag til brukstid, produktvalg og foreslått bruk er basert på generalisering og tar ikke hensyn til de unike egenskapene til et individs sår. Hver pasients kliniker skal forbli eneansvarlig for å vurdere alvorlighetsgraden av pasientsår, bestemme riktig behandling og styre behandlingen av såret.

Referanser: 1. Boesch RP, Myers C, Garrett T et al. Pediatrics. 2012;129: e792–e797. 2. Cohen LP, Ovadia-Blechman Z, Hoffer O, Gefen A. Int Wound J. 2019; 1-14. 3. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Tlf: 22 70 63 70. The Mölnlycke, Mepilex and SafetaC trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC1202004


Mölnlycke[®]