

## INSTRUÇÕES DE USO

### Mepitel Film®

**Nome Comercial:** Mepitel Film®

**Nome Técnico:** Curativo

**Modelos:** Mepitel Film 6x7cm, Mepitel Film 10x12cm, Mepitel Film 10x25cm, Mepitel Film 15x20cm

**Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.**

**Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico: <http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/>.**

**O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone: (90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.**

“Produto médico estéril”

“Produto médico esterilizado por óxido de etileno”

“Fabricante recomenda uso único”

**ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES. OBSERVE OS AVISOS E PRECAUÇÕES APRESENTADOS, PARA ASSEGURAR A EFICIENTE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.**

### APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO

As embalagens unitárias do produto médico estão acondicionadas em caixa de papelão nas seguintes quantidades:

<b>Código do Produto</b>	<b>Produto e Dimensão</b>	<b>Quantidade por embalagem secundária</b>
296100	MEPITEL FILM 6x7 cm	10
296200	MEPITEL FILM 10x12 cm	10
296400	MEPITEL FILM 10x25 cm	10
296600	MEPITEL FILM 15x20 cm	10

### **Composição**

- Armação de papel: papel revestido de silicone.
- Material de suporte: filme transparente de poliuretano termoplástico, em conformidade a ASTM F1671.
- Camada de contato com a pele: camada de silicone macio de grau medico.
- Película protetora: filme de polipropileno em relevo.

### **Mepitel Film**

Mepitel Film é um curativo impermeável que fornece uma cobertura transparente flexível para proteger a pele ou a ferida de contaminação microbiana, penetração de fluidos e de outras contaminações externas ao mesmo tempo em que se adapta às irregularidades e contornos do corpo.

Ele entra em contato com a pele lesada e atua como uma barreira mecânica com principal intenção de gerenciar o microentorno da ferida. Mepitel Film, por ser uma barreira mecânica, também reduz a tensão e atrito na pele, ajudando a prevenir lesões na pele.

### **Indicação de Uso**

O Mepitel Film é um curativo macio, estéril, transparente e respirável, composto por uma película de poliuretano revestida com uma camada de contato Safetac®. Mepitel Film foi concebido para gerenciar uma grande variedade de feridas superficiais. Mepitel Film protege a pele frágil e sensível.

Mepitel Film também pode ser utilizado como cobertura protetora de feridas cirúrgicas abertas (p. ex. no abdômen), para fixar um curativo principal como curativo secundário e ser utilizado em combinação com géis e pomadas.

O Mepitel Film poderá permanecer no local da ferida por vários dias, dependendo do estado da ferida e sua pele circundante ou conforme indicado pela prática clínica local.

O uso do Mepitel Film deve ser supervisionado por um profissional de saúde Qualificado.

## **Modo de utilização**

1. Limpe a área de aplicação de acordo com os procedimentos normais.
2. Seque totalmente a pele/pele circundante a ferida.
3. Retire a película protetora (impressa) e aplique o lado adesivo sobre a ferida; alise Mepitel Film no lugar para assegurar uma boa aderência. Não estique. A forma do produto poderá não ser a ideal para aplicação em zonas difíceis, p. ex. no calcanhar.
4. Mepitel Film pode ser reposicionado desde que a armação de papel esteja intacta. Retire a armação de papel.
5. Para obter os melhores resultados, Mepitel Film deve cobrir a pele seca circundante em, pelo menos, 1-2 cm nos tamanhos menores (até 10x12 cm) e 5 cm nos tamanhos maiores, de modo que o curativo seja fixado com segurança.
6. O curativo pode ser removido sem que exista desprendimento da pele e sem dor.

## **Precauções, Advertências e Contra-Indicações**

- Não utilizar para fixar cateteres em aplicações I.V., cânulas, adaptadores, ou outros dispositivos de perfusão ou de suporte de vida.
- Não reutilizar. Se reutilizado, o desempenho do produto poderá deteriorar-se e poderá ocorrer contaminação cruzada.
- Produto Estéril. Não utilizar se a embalagem interior estiver danificada ou aberta antes da utilização. Não reesterilizar.
- O fabricante recomenda uso único.
- Mepitel Film não é poroso nem absorvente, o que não permite que o exsudado da ferida passe através do curativo para uma camada secundária.
- Caso seja utilizado mais de um produto e estes sejam sobrepostos, a permeabilidade ao vapor reduz-se; tal pode originar a impossibilidade de eliminar o excesso de umidade da pele.
- Em caso de sinais de infecção clínica, consulte um profissional de saúde de modo a obter o tratamento adequado para a infecção.



### **Condições de Armazenamento e Transporte**

Deve ser armazenado em condições secas e protegido de luz solar direta.

Transportar o produto em sua embalagem original.

### **DESCARTE**

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS - para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC 306, de 07/12/2004 ou suas atualizações.

**DATA DE FABRICAÇÃO:** Vide embalagem

**VALIDADE:** Vide embalagem.

**REGISTRO ANVISA:** 80733280001

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Kaynara Cordeiro – CRF/SP 78229

### **IMPORTADOR:**

MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

Av. Portugal, 1100 – Parte C43, Bairro Itaqui - Itapevi

**CEP:** 06696-060

**E-MAIL:** Kaynara.cordeiro@molnlycke.com

**CNPJ:** 12.600.168/0001-17

ITAPEVI/SP

### **Fabricante Legal:**

Molnlycke Health Care AB, Gamlestadvägen 3C, PO Box 13080, Gotenborg, SE-402 52 - Suécia

Fabricado na Finlândia