


INSTRUÇÕES DE USO

Mölnlycke - Exufiber®

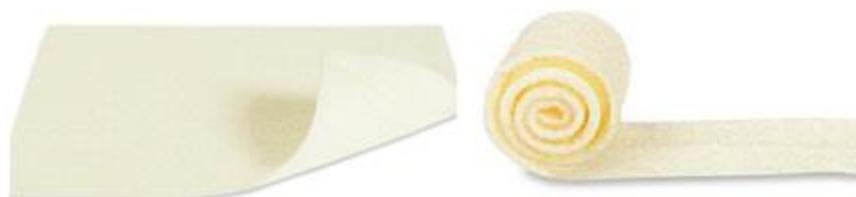

Nome Técnico: Curativo

Nome Comercial: Mölnlycke - Exufiber®

Modelos: 709900 - Exufiber® 5x5cm; 709901 - Exufiber® 10x10cm; 709902 - Exufiber® 15x12cm; 709903 - Exufiber® 15x15cm; 709904 - Exufiber® 20x30cm; 709905 - Exufiber® 4.5x10cm; 709906 - Exufiber® 4.5x20cm; 709907 - Exufiber® 4.5x30cm; 709908 - Exufiber® 1x45cm; 709909 - Exufiber® 2x45cm.

Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.

Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico:
<http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/>.

O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone:

(90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.

“Produto médico estéril”

“Produto médico esterilizado por óxido de etileno”

“Fabricante recomenda uso único”

“Não utilizar se a embalagem estiver danificada”

“Não contém látex”

ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES. OBSERVE OS AVISOS E PRECAUÇÕES APRESENTADOS, PARA ASSEGURAR A EFICIENTE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.

APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO

Código do Produto	Produto e Dimensão	Quantidade por Embalagem Secundária
709900	Exufiber® 5x5cm	10
709901	Exufiber® 10x10cm	10
709902	Exufiber® 15x12cm	10
709903	Exufiber® 15x15cm	10
709904	Exufiber® 20x30cm	5
709905	Exufiber® 4.5x10cm	10
709906	Exufiber® 4.5x20cm	10
709907	Exufiber® 4.5x30cm	10
709908	Exufiber® 1x45cm	5
709909	Exufiber 2x45cm	5

Descrição do Produto


O Exufiber® é um curativo estéril de não-tecido estéril fabricado em fibras de álcool polivinílico, revestidas com glicerol altamente absorventes. Em contato com o exsudato da ferida, o Exufiber® transforma-se num gel que ajuda na cicatrização úmida da ferida e facilita a remoção durante a troca do curativo. O Exufiber® absorve e retém o exsudato da ferida. Exufiber® está disponível sob as formas de placa de curativo plano e fita.

Indicação de Uso


Os curativos para feridas o Exufiber® destinam-se a ser utilizados numa grande variedade de feridas com exsudato:

- Úlceras da perna e do pé;
- Úlceras por pressão;
- Queimaduras de segundo grau;
- Feridas cirúrgicas;
- Áreas doadoras de pele;
- Feridas malignas.


Instruções de Uso

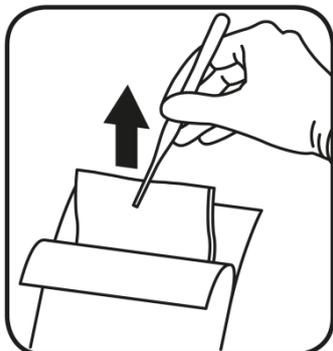

1. Remova o produto da embalagem

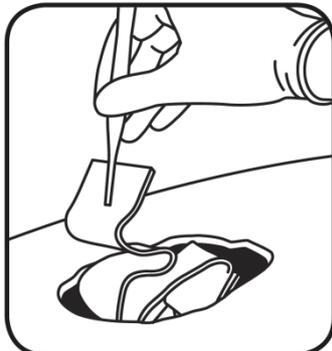

2. Coloque o produto no interior da ferida

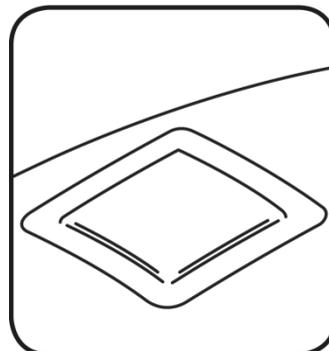

3. Cubra com um curativo secundário apropriado

Feridas pouco profundas

Aplicação:

1. Lave a ferida com solução salina ou água, de acordo com a prática clínica.
2. Seque bem a pele circundante.
3. Escolha o tamanho certo de curativo para cobrir toda a ferida. Para obter os melhores resultados, o Exufiber® deve sobrepor a pele seca circundante em, no mínimo, 1-2 cm para tamanhos de curativos menores (até 10x10 cm) e 5 cm para tamanhos de curativos maiores.

O curativo irá inchar, causando a contração das bordas à medida que absorve o fluido da ferida e começa a gelificar.

4. Aplique um curativo Exufiber® seco sobre a ferida.
5. Fixe com um curativo secundário apropriado. A escolha depende do nível de exsudato.
6. É possível utilizar terapia de compressão em conjunto com Exufiber®.

Mudança e remoção do curativo:

1. Mude o curativo Exufiber® quando atingir a saturação. Exufiber® pode ser deixado no local durante até 7 dias, dependendo da condição da ferida ou conforme indicado pela prática clínica.

2. Retire o curativo secundário e descarte-o da forma apropriada.
3. Retire o curativo Exufiber® lavando/enxaguando suavemente com solução salina ou água, de acordo com a prática clínica padronizada. Qualquer material não gelificado ficará úmido em contato com a solução salina.

Feridas profundas e cavidades

Aplicação:

1. Lave a ferida com solução salina ou água, de acordo com a prática clínica.
2. Seque bem a pele circundante.
3. Encha a ferida sem forçar com o produto em curativo ou fita, deixando espaço para que o curativo inche. Ao utilizar curativo em fita, corte o comprimento apropriado deixando uma ponta de 2-3 cm fora da ferida para fácil remoção.
4. Cubra com um curativo secundário apropriado. A escolha depende do nível de exsudato.
5. Fixe (ou cubra) com um curativo adesivo ou bandagem, conforme for apropriado.

Mudança e remoção do curativo:

1. Mude o curativo Exufiber® quando atingir a saturação. Exufiber® pode ser deixado no local durante até 7 dias, dependendo da condição da ferida ou conforme indicado pela prática clínica.
2. Retire o curativo secundário e descarte-o da forma apropriada.
3. Retire o curativo Exufiber® lavando/enxaguando suavemente com solução salina ou água, de acordo com a prática clínica padronizada. Qualquer material não gelificado ficará úmido em contato com a solução salina.

Área doadora de pele

Aplicação:

1. Colha tecido e assegure a hemostase (conforme a rotina normal).
2. Escolha o tamanho certo de curativo para cobrir toda a ferida. O curativo Exufiber® deve sobrepor a pele seca circundante em, no mínimo, 5 cm. O curativo irá inchar, causando a contração das bordas do curativo, a medida que absorve o fluido da ferida e começa a gelificar.

3. Aplique um curativo Exufiber® seco sobre a ferida.
4. Cubra com um curativo secundário apropriado. A escolha depende do nível de exsudado.
5. Fixe (ou cubra) com um curativo adesivo ou bandagem, conforme for apropriado.

Mudança e remoção do curativo:

1. Mude o curativo Exufiber® quando atingir a saturação. Exufiber® pode ser deixado no local durante até 14 dias em áreas doadoras, dependendo da condição da ferida ou conforme indicado pela prática clínica.
2. Retire o curativo secundário e descarte-o da forma apropriada.
3. Retire o curativo Exufiber® lavando/enxaguando suavemente com solução salina ou água, de acordo com a prática clínica padronizada. Qualquer material não gelificado ficará úmido em contato com a solução salina.

Precauções, Advertências e Contra-Indicações

- O Exufiber® deve ser utilizado sob a supervisão de um profissional de cuidados médicos qualificado.
- Todas as feridas devem ser inspecionadas com frequência.
- Em caso de sinais de infecção clínica, consulte um profissional de saúde de modo a obter o tratamento adequado para a infecção. O Exufiber® não substitui a necessidade de terapia sistêmica ou outro tratamento de infecção adequado.
- Exufiber® não se destina a feridas secas, ou queimaduras de terceiro grau.
- Exufiber® é de utilização única e não deve ser reutilizado. A reutilização pode conduzir a deterioração do produto ou poderá ocorrer contaminação cruzada.
- Produto Estéril. Não utilizar se a embalagem interior estiver danificada ou tiver sido aberta antes da utilização. Não reesterilizar.
- Não utilizar após a data de validade. Se o produto for utilizado após a data de validade, não é possível garantir as propriedades do mesmo.
- No caso de o curativo secar e ser difícil de remover, deve ser umidificado de acordo com as práticas locais (por exemplo com solução salina estéril ou água



estéril), deixando-se embeber até ser facilmente levantado. Pode demorar vários minutos para que o Exufiber® se transforme em gel. Retire o curativo lavando/enxaguando suavemente.

Armazenamento e Transporte

Deve ser guardado em condições secas e temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

DESCARTE

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS - para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC 306, de 07/12/2004 ou suas atualizações.

DATA DE FABRICAÇÃO: Vide Embalagem

VALIDADE: Vide Embalagem

REGISTRO ANVISA: 80733280027

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Kaynara Cordeiro – CRF/SP 78229

IMPORTADOR:

MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
Av. Portugal, 1100 – Parte C43 – Itaqui - Itapevi, SP CEP: 06696-060
CNPJ: 12.600.168/0001-17

FABRICANTE LEGAL:

Molnlycke Health Care AB
Gamlestadsvagen 3C, PO Box 13080, Goteborg, SE-402 52 - Suécia
Fabricado no Reino Unido