

BARRIER® Extremitetslakan - bilateralt fot




- Drisite® Plus för god vätskehantering där materialet utsätts för rikligt med vätska
- Optimal vikning för aseptisk hantering, lätt fören person att drapera
- Förstärkt material i det kritiska området för bättre hållbarhet och infektionskontroll
- 100% vätsketättmaterial som ger optimal patientsäkerhet



1. Vik ut instrumentbordslakanet och placera det under patientens ben.



2. Placera det utvikta extremitetslakanet över patientens fötter med anvisningsetiketten uppåt mot patientens kropp.

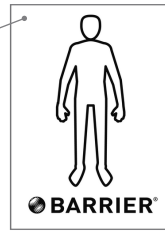

3. För in händerna genom den elastiska öppning och ta tag i patientens fötter. Vik ut lakanet över fotändan på op. bordet och sedan uppåt.



4. Vik ut operationslakanet över narkosbågen.

| Art. nr. | Beskrivning | Storlek | Absorbtionsyta | Avd/Trp |
|----------|---|---|----------------|---------|
| 60300 | Extremitetsset, bilateralt fot: 4 x Cellduk 2 x Op-tejp 1 x Bilateralt fotlakan, elastikst hål 3.5cm 1 x Förstärkt instrumentbordslakan | 18 x 25cm 9 x 49cm 200 x 300cm 150 x 190cm | 75 x 190cm | 7 / 14 |

Samtliga komponenter ovan går att lägga i Mölnlycke® kundanpassade set.

| Art. nr. | Mölnlycke® kundanpassade set komponent | Storlek |
|----------|--|-------------|
| 70311 | Bilateralt fotlakan, elastikst hål 3.5cm | 200 x 300cm |

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Tel. 031-722 30 00. Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen och BARRIER® är registrerade globalt och tillhör något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna. SESU0371803