

BARRIER® Höftlakan med dislokationspåse




- Drisite® Plus för god vätskehantering där materialet utsätts för rikligt med vätska
- Förstärkt material i det kritiska området tillhandahålla tillförlitlig kvalitet med hög rivhållfasthet
- Tredimensionell design för att på ett effektivt sätt säkerställa sterilt område
- Integrerade slanghållare för att på ett effektivt sätt fästa slangar etc.
- Optimal vikning för aseptisk applicering
- 100% vätsketättmaterial som ger optimal patientsäkerhet



1. Vik ut lakanet och placera det under patientens ben.



2. Alt. 1: Placera en självhäftande op-handduk under benet med den självhäftande kanten pekandes mot huvudändan, ta bort skyddspapperet. Placera en andra självhäftande op-handduk över den första handduken med den självhäftande kanten pekandes mot fotändan.

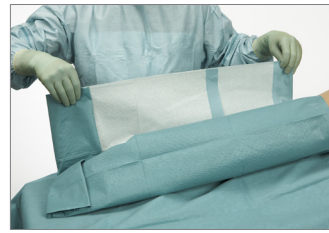

3. Vik handdukarna runt ben och fot.



4. Försegla kanterna runt foten och längs med benet med op-tejp.



2. Alt. 2: Täck benet med en ortopedistrumpa och fixera med op-tejp.



5. Placera foten i hålet på lakanet. På undersidan av operationslakanet finns en självhäftande kant som kan användas för extra fixering.



6. För lakanet mot patientens huvud, fäst det elastiska hålet i rätt läge.



7. Vik ut operationslakanet över narkosbågen.

Art. nr.	Beskrivning	Storlek	Absorbtiionsyta	Avd./Trp.
60602	Höftlakan med dislokationspåse: 1 x Förstärkt assistansbordspåse 4 x Cellduk 1 x Instrumentbordslakan 2 x Självhäftande op-handduk 1 x Ortopedistrumpa 2 x Op-tejp 1 x Höftlakan med dislokationspåse, elastiskt hål 18 x 22cm 1 x Förstärkt instrumentbordslakan	79 x 145cm 18 x 25cm 150 x 190cm 75 x 75cm 32 x 120cm 9 x 49cm 230/300 x 330cm 150 x 190cm	65 x 85cm 75 x 190cm 75 x 190cm	3 / 6
60601	Höftlakan med dislokationspåse, elastiskt hål 18 x 22cm, inslagen	230/300 x 330cm		4 / 8

Samtliga komponenter ovan går att lägga i Mölnlycke kundanpassade set.

Art. nr.	Mölnlycke® kundanpassade set komponent	Storlek
70601	Höftlakan med dislokationspåse, elastiskt hål 18 x 22cm	230/300 x 330cm

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg. Tel. 031-722 30 00. Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen och BARRIER® är registrerade globalt och tillhör något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna. SESU0311803

Mölnlycke®