



BARRIER® Laparoskopilakan abdo-perineal

- Allt-i-ett-lakan med integrerade funktioner
 - för enkel och effektiv drapering av en person
 - för att spara tid
 - för att minska risken för kontaminering
- BARRIER® Flex har flexibla och formbara självhäftande kanter som möjliggör en effektiv förslutning när buken insuffleras
- Fyra integrerade slanghållare för att skapa ett effektivt arbetsområde
- Integrerade djupa påsar anpassade till laparoskopiska instrument
- Extra långa benpåsar för att säkerställa en säker drapering för alla typer av benstöd med
 - integrerad tejp för justering av längden
 - transparenta sidor som tillåter en synlig kontroll av extremiteterna i syfte att säkerställa en korrekt positionering
- Justerbar självhäftande perineal öppning med integrerat täcklakan
- 100% vätsketätt material som ger optimal patientsäkerhet

Draperingsinstruktion



1. Notera riktningen på piktogrammet på laparoskopilakanet. Ta bort skyddspappret.



2. Placera lakanet centrerat på patienten.



3. Tryck försiktigt för att fästa limkanterna. Vik ut lakanet mot dig själv och sedan ifrån dig.



4. Se piktogram av foten. Ta tag i hörnet av benpåsen och vik ut lakanet över benet. Gör samma sak för det andra benet.



5. Vik sedan ut lakanet mot patientens huvud.



6. Placera den icke-självhäftande öppningen i enlighet med ingreppet.



7. Fäst första sidan av den självhäftande öppningen mot patientens hud. Ta bort skyddspappret undertiden du draperar för en optimal vidhäftning. Fortsätta med den andra sidan. Placera perineallakanet över underlivet.



8. Använd den integrerade tejen för att justera benpåsens längd och fästa lakanet.



9. Se till att den självhäftande filmen är fäst ordentligt mot patienten och ta bort skyddspappret.

Draperingen är nu slutförd.



10. Använd de integrerade påsarna och slanghållarna för att skapa ett effektivt arbetsområde.

För ytterligare information om Mölnlycke Health Care eller för att titta på draperingsinstruktionsvideon, scanna QR-koden här bredvid.



Artikel nr.	ProcedurePak komponenter
944201	Laparoskopilakan 250/200/300X260 cm, hål 32x30 cm och 10x13 cm

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg. Telefon 031-722 30 00, www.molnlycke.se
Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen, ProcedurePak® och BARRIER® är registrerade varumärken av Mölnlycke Health Care AB. © 2016. Mölnlycke Health Care AB. Eftertryck förbjudes.

