




## **BARRIER®** Laparoskopilakan för robotkirurgi

- Tredimensionell design som ger en god täckning av patienten och operationsbordet
- Flexibla och formbara självhäftande kanter, som möjliggör en effektiv drapering
- Transparent del över anestesibågen
- 100% vätsketätt material som ger optimal patientsäkerhet
- Optimal vikning för aseptisk applicering, för en person att drapera



# Draperingsinstruktion

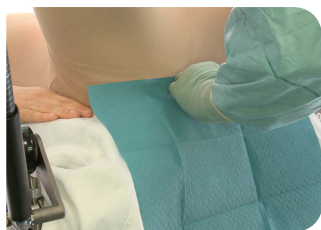

1. Använd en självhäftande handduk som underläggsduk.



2. Ta bort skyddspappret på perineallakanet och fäst lakanet ordentligt på patienten. Låt lakanet vara stängt.



3. Notera riktningen på piktogrammet på lakanet. Ta bort skyddspappret och placera operationslakanet centrerat på patienten.



4. Ta tag i båda hörnen på benpåsarna och vik ut lakanet över patientens båda ben.



5. Vik sedan ut lakanet mot patientens huvud.



6. Vik ut perineallakanet genom perineal öppningen, ta bort skyddspappret, och fäst mot lakanet.

Ref. nr.	ProcedurePak® komponenter
944215	Laparoskopilakan 300/200/270x365 cm, hål 25x30 cm och 15x24 cm, transparent
988522	Perineallakan 60x116 cm med påse, självhäftande hål 9x12 cm
706400	Självhäftande op-handduk 3-lager, 50x50 cm

Läs mer på [www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg  
Telefon 031-722 30 00, fax 031-722 34 01. [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen, ProcedurePak® och BARRIER® är registrerade varumärken av Mölnlycke Health Care AB. Copyright (2011)