

## Det effektiva absorberande skumförbandet

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte<sup>1,2</sup>
- Skonsam vidhäftning och behagligt att bära
- Enkelt att applicera och glider inte iväg under fixering
- Mycket formbart och kan enkelt klippas till rätt storlek\*

### Absorberande polyuretanskum

- Absorberar sårsekret
- Kan användas under kompression
- Formar sig lätt efter kroppens konturer

### Safetac<sup>®</sup> yta

- Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte<sup>1</sup>
- Vidhäftar inte i det fuktiga såret utan endast på den torra huden
- Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration<sup>3</sup>



### Polyuretanfilm på ovansidan:

- Andningsbar
- Vätsketät
- Virus och bakteriebarriär\*


\* mikrober större än 25 nm

\* Mepilex behövs inte klippas till sårets storlek vid kompressionsbehandling


### Safetac<sup>®</sup> teknologi. Mindre smärta. Mindre vävnadsskada.

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är skonsam vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

För mer information [www.safetac.com](http://www.safetac.com)

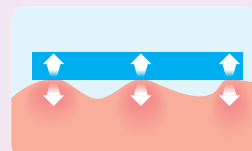


Traditionell vidhäftning fäster endast på hudens översta ytskikt och måste därför vidhäfta aggressivt för att sitta på plats

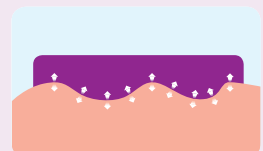

Safetac formar sig efter hudens ojämnheter och sluter sig kring sårkanterna


## Så här används Mepilex®

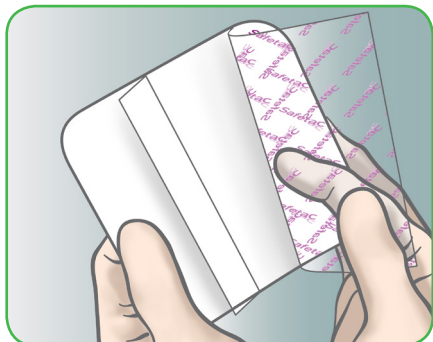

Rengör sårområdet. Ta bort skyddsfilm.



Mepilex ska överlappa den omkringliggande huden med ca 2 cm. Lägg den kläbbiga sidan mot såret. Sträck inte förbandet.

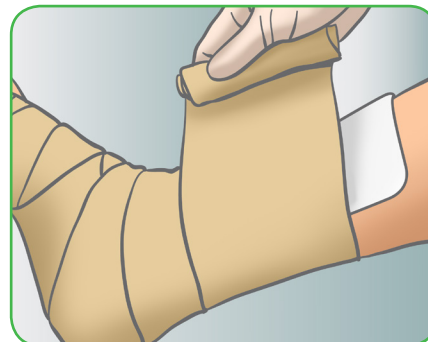

Om nödvändigt, fixera Mepilex med binda eller annan fixeringsprodukt.

## Så här fungerar Mepilex

Mepilex är ett mjukt och formbart skumförband som absorberar sårsekret och bibehåller en fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskar risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

## Fördelar med Mepilex

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte
- Frigör båda händerna vilket underlättar applicering av fixeringslösning
- Fungerar bra under kompression
- Förbandet är följsamt och kan enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om
- Skonsam vidhäftning och behagligt att bära
- Kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets tillstånd
- Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan
- Låg risk för hudirritation och allergi

## Användningsområden

Mepilex kan användas på ett stort antal sår som t.ex. ben- och fotsår, trycksår, traumatiska- och smärtsamma sår, sår med skadad eller ömtålig hud.

## Notera

Vid kliniska tecken på infektion kan man fortsätta behandlingen med Mepilex om lämplig infektionsbehandling inleds.

## Mepilex sortiment

(levereras sterila, enstycksförpackade)

	Art nr	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
	294015	5 x 5	5	40
	294100	10 x 10	5	70
	294200	10 x 20	5	45
	294300	15 x 15	5	25
	294400	20 x 20	5	20
	294500	20 x 50	2	12
Mepilex Heel	288100	13 x 20	5	25
	288300	15 x 22	5	30



Mer information på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB  
Box 13080, 402 52 Göteborg  
Telefon: 031 - 722 30 00  
[www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)  
[www.molnlycke.se/patient](http://www.molnlycke.se/patient)

The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac® and Mepilex® are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

